

ナイトライフC for men (クラミジア) 検査サービスパック Nightlife C for Men Sampling Kit

取扱説明書

本サービスは、登録衛生検査所による性器クラミジア検査の受託サービスです

- ◎使用に関しては、取扱説明書を必ずお読みください。
- ◎本サービスは、特定の疾患で治療中の方はご利用いただけません。
(ご不安な方はかかりつけ医に相談のもと検査を受けることをおすすめします)

手順動画はこちら



1 キット内容



- ①取扱説明書
- ②検査サービス 申込書
- ③宅配伝票
- ④発泡箱
- ⑤採取容器
- ⑥保冷剤
- ⑦吸収材
- ⑧チャック袋
- ⑨緩衝材

2 事前準備

- ①前日までに保冷剤を冷凍する。

- ②申込書の太枠内を記入する。

ナイトライフ for men 検査サービス 申込書【お客様控え】

姓 氏 名 匿名太郎 性 男

〒 21 8 1

〒 2014 4 18

019 681 6710

検査結果を確認する際に使用しますので大切に保管してください。

検査報告書郵送希望しない場合の記入例(匿名記載)

ナイトライフ for men 検査サービス 申込書【お客様控え】

姓 氏 名 匿名太郎 性 男

〒 21 8 1

〒 2014 4 18

019 681 6710

検査結果を確認する際に使用しますので大切に保管してください。

検査報告書郵送希望の場合の記入例


3 検体採取・梱包方法

- ①採尿容器に尿を採取する。

※採取した当日に指定の薬王堂店舗持参または、宅配(送料お客様負担)にて発送してください



- ▶採尿容器の黄色のカバーをまっすぐ抜き取り、口部分をキャップの中にしっかりさし込む。

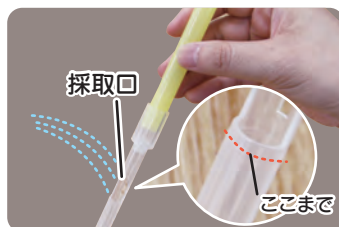

- ▶放尿中の尿に採取口をあて、尿をとる。



- ▶尿を採取後、黄色のカバーをもう一度抜き取り元の位置に戻す。戻すときは、カチッと音がするまでしっかり奥までさし込む。



- ▶ラベルを切り取り線より切り離し、氏名を記入し、銀色のテープをはがし巻きつけて貼る。
※記入する氏名(匿名)は、申込書に記入した氏名(匿名)を必ず記入する。

- ②チャック袋に吸収材と採用容器2つを入れ、しっかりとしめる。



※採尿容器から尿が漏れていないことを確認してください。

- ③密閉されたチャック袋を緩衝材に入れる。



- ④下記3点を発泡箱に入れる。



- 尿検体(梱包済みの③)
- 冷凍された保冷剤
- 申込書2枚目

- ⑤ガムテープ等でしっかりと梱包する。



⑥宅配伝票に必要事項を記入し発泡箱に貼る。



※薬王堂店舗に持参の場合も宅配伝票を貼ってください(薬王堂店舗へ持参の場合は、宅配伝票のご依頼主様部分の記載は不要です)

⑦下記方法にて弊社まで送付ください。



A
指定の薬王堂店舗へ持参

指定店舗・指定曜日をwebサイトにて確認する



<https://cellspect-yakuodo.com/>

指定店舗、指定曜日の13時までに、宅配伝票を貼った発泡箱を持ち込む

13時以降に弊社が回収いたします。

※指定店舗・指定曜日以外または13時を過ぎた場合は、薬王堂店舗では回収できませんので、**B** ゆうパック取扱郵便局 (送料お客様負担) にて、発送ください。

B
ゆうパック取扱郵便局にて発送 (送料お客様負担)

宅配伝票を貼った発泡箱を、ゆうパック取扱窓口のある郵便局に持参いただき、送料お客様負担にて、弊社まで発送ください。

土・日・祝日は検体の受付をしておりません。祝日を除く月～金に到着するように発送をお願いします。

※採取した当日に、A または Bの方法でお持ち込みください

※サービス提供期間以後のお申し込みはできません。
(サービス提供期間は、商品箱の裏面に記載されています)

4 検査結果確認方法

Webサイトで確認できます。

検体が検査所に到着後、2営業日以内にWebにて検査結果を確認できます。

- ①受検者専用サイトにアクセスする
- ②申込書1枚目に貼付されているシールに記載の、検査IDとパスワードを入力する
- ③ログインして結果を確認する

※検査ID及びパスワードは、- (ハイフン) を忘れずに半角で入力してください。

※セキュリティ保護の観点から、受検者のお名前等の個人情報は一切表示されません。Webサイトによる閲覧ができる期間は、検査結果報告日を含めて**7日間**です。

検査結果報告書の郵送もできます。

申込書の検査結果報告書の希望欄にチェックを入れた方へ、簡易書留にて検体到着後 原則3営業日以内に発送させていただきます。

※郵便であるため、お届け日の指定や保証は致しかねますのでご了承ください。
※発送から10営業日以上経過してもお手元に届かない場合は誠にお手数ですが、下記までお問い合わせください。



QRコードはこちら

◀こちらのQRコードを読み取り、サイトへアクセスして結果をご覧ください。
<https://kompasu-check.cellspect-yakuodo.com/>

▲受検者専用サイト

▲申込書1枚目

※検査結果報告書は医師の診断書ではありません。

※本サービスによる検査結果は検査時点での感染状況に関するものであって、陰性の結果が出た方でも、検査後の感染機会の可能性がありますので、引き続き感染防止に万全を期していただくようお願い致します。また、検査結果は、偽陽性、偽陰性が生じる場合があることを予めご承知願います。すでに治療を受けている方、自覚症状のある方は、本サービスを利用する前に必ず医師にご相談ください。

お問い合わせ

セルスペクト株式会社(衛生検査所登録番号:第35号)
岩手県盛岡市北飯岡 2-4-23 TEL:019-681-2088
※受付時間:平日 9:00~17:00

保管または取扱上の注意

- ◎使用に関しては、取扱説明書を必ずお読みください。
- ◎高温多湿を避けて保管ください。
- ◎お住まいの市区町村の指導に従って廃棄してください。