



新型コロナウイルス PCR検査サービスパック (唾液採取キット・申込書)


Saliva sampling kit for COVID-19 PCR test

手順動画はこちら



- 本製品は「唾液：だえき」を採取するためのキットです。
- 検査を受ける人以外の唾液を使わないでください。
- 唾液以外の試料を絶対に使わないでください。
- 唾液採取後は速やかに「薬王堂検体受付スポット」にご持参ください。
(目安：唾液が採取された当日以内)

使用方法

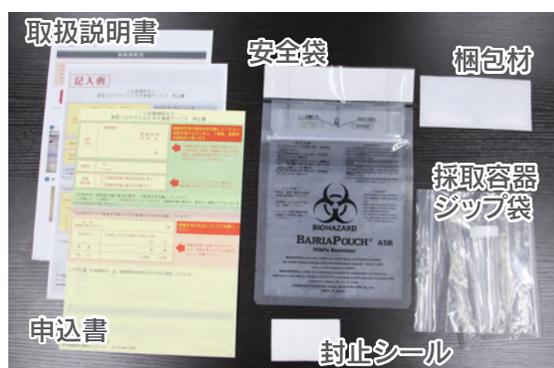

キット内容



「採取容器」の蓋を開けて、唾液を添加する。



蓋をしっかり閉めてください。



「ジップ袋」に「採取容器」と「梱包材」を入れる。



3 を「安全袋」に入れ、白いシールをはがし封をする。採取された唾液が安全に包装されたこの状態を「検体安全パッケージ」といいます。



「検体安全パッケージ」、申込書2枚目「ご提出用・ご返送用」の2点を必ず確認してしっかりと梱包する。「検体提出前のチェックリスト」を確認の上、封止シールを貼る。