

取扱説明書

- 本製品は「唾液：だえき」を採取するためのキットです。
- 検査を受ける人以外の唾液を使わないでください。
- 唾液以外の試料を絶対に使わないでください。
- 唾液採取後は速やかに「薬王堂検体受付スポット」にご持参ください。
(目安：唾液が採取された当日以内)

手順動画はこちら




<https://www.cellspect.com/pcr-sampling>

重要な 注意事項

- 飲食等の後、歯磨きを行なった後、最低 10 分以上後に採取してください。
- 唾液中のウイルスが希釈されて感度低下を招くことが懸念されるため、刺激唾液ではなく安静時唾液を採取してください。
- 唾液以外の試料を絶対に使わないでください。

採取容器への唾液の採取と検体安全パッケージ

1 キット内容の確認

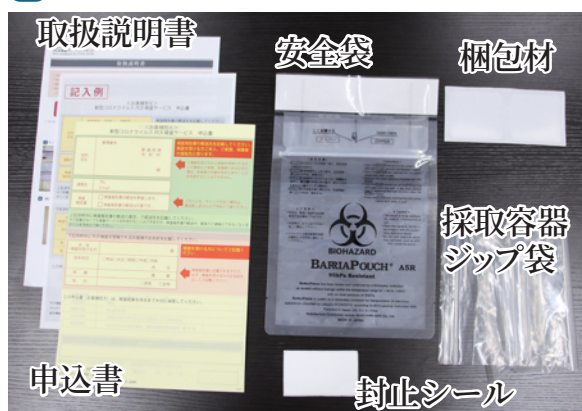


2 唾液を出しやすくする。



唾液腺マッサージやレモンなどの酸っぱい食べ物をイメージすると唾液が出やすくなります。

3 「採取容器」の蓋を開けて、唾液を添加する。

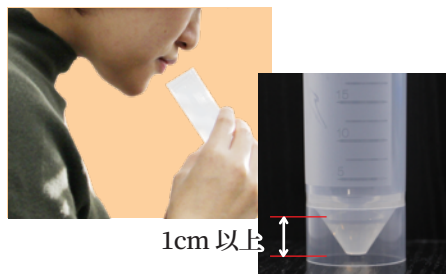

この時、採取容器の底面から高さ1cm以上越えるまで入れてください。

※唾液以外の試料を絶対に入れないでください。

4 蓋をしっかりと閉めてください。



5 「ジップ袋」に「採取容器」と「梱包材」を入れる。



6 5を「安全袋」に入れ、白いシールをはがし封をする。



採取された唾液が安全に包装されたこの状態を「検体安全パッケージ」といいます。

検体の梱包とお申し込み

- 1 同梱の記入例に沿って申込書の1枚目「お客様控え」に必要事項を記載し、2枚目の「ご提出用・ご返送用」から切り離す。
- 2 「検体安全パッケージ」、申込書2枚目「ご提出用・ご返送用」の2点を必ず確認してしっかりと梱包する。「検体提出前のチェックリスト」を確認の上、封止シールを貼る。



- 3 Web サイトにて受付時間をご確認の上、「検体受付スポット」へ持参をお願い致します。

検体受付スポット、受付時間は
右記QRコードにアクセスし、ご確認ください。


https://cellspectyakuodo.com/Landing/LandingCartInput_pcr.aspx

※検体受付スポットと受付時間は、当該地域における感染者の発生状況や警戒宣言（緊急事態、非常事態、気象警報等）等の都合により変更になる場合がございます。Web サイトにて最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。



検査結果の確認方法

Webサイトで確認できます。 お申込日翌日の18時に受検者様専用 Web サイトで検査結果をご確認いただけます。

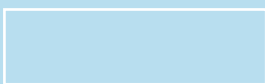

<https://pcr.cellspect-yakuodo.com/>

◀こちらのQRコードを読み取り、サイトへアクセスして結果をご覧ください。

- セキュリティ保護の観点から、受検者のお名前等の個人情報は一切表示されません。Web サイトによる閲覧ができる期間は、検査結果報告日を含めて7日間です。

検査結果報告書の郵送もできます。

申込書の郵送希望欄にチェックを入れた受検者の方へ簡易書留にて原則3日以内に発送させていただきます。

- 郵便であるため、お届け日の指定や保証はいたしかねますのでご了承ください。
- お申込みから一週間以上経過してもお手元に届かない場合は、誠にお手数をおかけいたしますが、下記までお問い合わせください。

PCR 検査サービス お問い合わせ

セルスペクト株式会社・衛生検査所（登録番号：第35号）

岩手県盛岡市北飯岡2-4-23 TEL:019-681-2088

受付時間：平日 9:00～17:00